

Beaty

asistent nepřímé srdeční masáže



„Beaty” jako
přívěsek na klíče

Přístroj, který kontroluje a pomáhá provádět správně KPR. Pomocník a asistent, kterého můžete doslova mít stále s sebou, třeba jako klíčenku. Jeho rozměry jsou velmi malé, ale jeho přínos je obrovský. Přiložením „Beatyho” na hrudník zachraňované osoby, získáte velmi užitečného pomocníka. U nepřímé srdeční masáže je nejdůležitější hloubka masáže (jak hluboko zatlačíte hrudní koš), protože jen správná hloubka, zajistí dobrý kontakt se srdcem. „Beaty” při správném tlaku na hrudník vydá zvukový signál. Vždy když pípne, tak provádíte nepřímou srdeční masáž (KPR) správně. V kombinaci s použitím automatického externího defibrilátoru Defibtech Lifeline, který stejným zvukovým signálem hlídá správné tempo masáže a synchronizací obou pípnutí, si můžete být jisti, že vaše záchrana lidského života je prováděna správně.

Resuscitace s použitím Beaty




Zkontrolujte vědomí

Jemně postiženým zatřeste
Hlasitě jej oslovte: „Jste v pořádku?”




Pokud nereaguje

Zprůchodněte dýchací cesty
záklonem hlavy a zkontrolujte
dýchání a volejte 155.

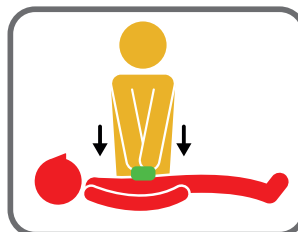

Ihned zahajte resuscitaci

Pomocí „Beaty”, frekvencí
100 - 120/min.

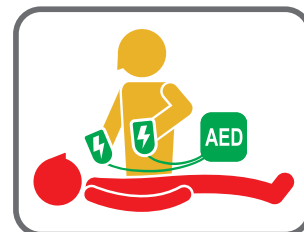

Zapněte AED a nalepte elektrody

Dále pokračujte podle hlasových
pokynů přístroje.



čas je rozhodující



doma v lékárnice,
v práci v lékárnice



kvalitní masáž je základ
úspěchu záchrany



vždy s sebou, nikdy nevíte,
kdy jej budete potřebovat



asistent nepřímé srdeční masáže

Asistent „Beaty“ je již součástí lékárníček na mnoha místech světa. 88% všech zástav srdce se odehraje doma v domácím prostředí. Ne vždy máte po ruce AED a tak nejbližším pomocníkem, může být právě „Beaty“. Efektivně prováděná nepřímá srdeční masáž je šancí na přežití. Poznat, zda provádíte KPR dobře není jednoduché, proto je dobré mít u sebe pomocníka - asistenta „Beaty“.

Tento malý přístroj byl vyvinut týmem zdravotních vývojářů a lékařů. Jeho použití doporučují i profesionální záchranáři. Naleznete jej v domácnostech, lékárnkách, záchranářských brašnách a kapsách po celém světě.



**K AED Defibtech Lifeline vždy
jeden kus "Beaty" zdarma.
Nabídka platí do konce roku 2020!**

-  poskytuje zpětnou vazbu týkající se účinnosti kompresí hrudníku
-  náhlá srdeční zástava se vyskytuje doma, míra jejího přežití je nižší než 10%
-  úspěšné KPR je komprese hrudníku do hloubky 5-6 cm
-  vyhodnocení správné hloubky komprese je složité i pro profesionální záchranáře
-  „Beaty“ se umísťuje mezi dlaň zachránce a hrudníkem pacienta
-  silikonový adaptér zvyšuje ochranu přístroje
-  „Beaty“ v žádném případě nenahrazuje AED
-  záchrana lidského života kombinujte s použitím AED
-  v případě použití AED Defibtech Lifeline vám bude AED pomáhat udržet rytmus správné masáže

**cena:
990,- Kč
s DPH**